

# センター肘掛金具

(株) ミキ・高さ調整式アームサポート専用型



センター肘掛本体及び付属品一式  
(写真は左用です。)



オプション部品  
(株) ミキ・アームサポート異型縦パイプ及びエンドキャップ・エンドキャップ取付け用ポップリベット一式



既存の車椅子に本製品を取付ける場合に、異型縦パイプに正確に取付け穴位置をマーキングできる治具です。

(株) ミキ製グランドフリツチャー (GF) 等の高さ調整式アームサポートの異型縦スライドパイプに取付ける専用センター肘掛です。

チルト及びリクライニング角度に合わせて簡単に、弊社開発のセーフティープランジャーでワンタッチでアームレストの角度を調整できます。

本製品の部品販売は弊社でも行っておりますが、新車購入時での取付けでは(株) ミキ様で対応して頂いておりますのでご相談下さい。

(注意: この製品は子供用に使用して下さい。耐荷重は、上下方向共に約33kgです。それ以上の荷重が掛かる使い方をすると重大な事故に繋がる可能性があります。)

## [仕様]

パッド取付け部寸法: 26, 8 x 240mm/m ベース本体寸法: 40 x 69, 5mm/m

異型縦パイプ取付け方法: M6六角穴付き皿ボルト x 2本 (26, 5mm/mピッチ)

角度調整範囲: 水平~45度

材質: アーム部 SCM45 (焼入れ材) 本体部: SPCC (表面焼入れ材)

表面処理: カチオン電着塗装 (黒)

## [製造・販売・連絡先]

神奈川でく工房

担当: 木下


〒216-0035 神奈川県川崎市宮前区馬絹1630

TEL: 044-865-5783 FAX: 044-857-5387


# センター肘掛金具

(株) ミキ・高さ調整式アームサポート専用型取り付け方法

## 1. 専用オプション異型縦パイプを使っての組立て方。

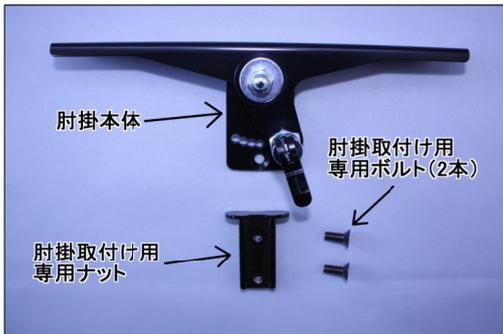


本体及び付属部品一式（写真は左側金具です。販売は左右セットです。）

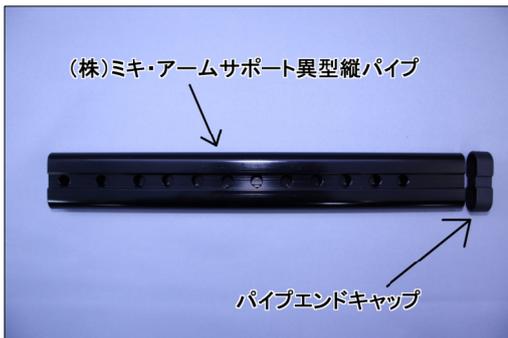

アームサポート異型縦パイプ及び付属品一式その他固定用のポップナット

パイプに左右勝手は有りませんが上下が有り、パイプ端部から11.5m/mでφ8の穴が開いている方が上側です。


（販売は左右セットです。）

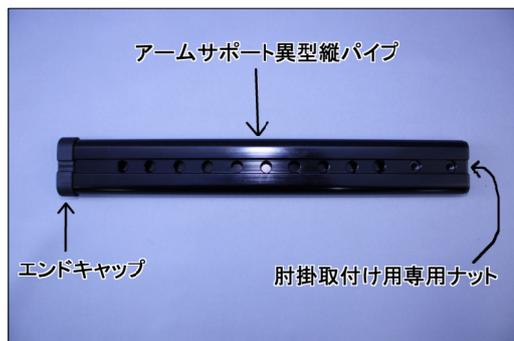

異型縦パイプの組立てです。

パイプの上部側に肘掛取り付け用専用ナットを凹面を穴側にして挿入して下さい。もし硬い場合は、叩いて入れますが必ず中心を叩いてください。端を叩くと上部に溶接して有ります板が曲がります。

パイプ上部の1番目と2番目の穴位置にナットのタップが中心に来ている事を確認してください。

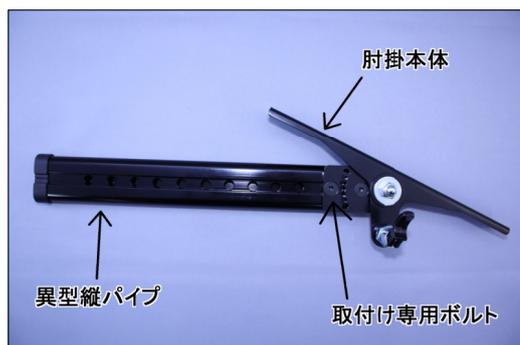

パイプへ本体を取付けます。

付属の六角穴付きボルトを使い、確実に固定してください。

その際、プランジャーのロックを外し写真の用にアームを傾けると皿ボルト用穴が露出します。



プランジャーのロック位置をアームが水平位置（一番端しの穴）にして本体とパイプとの組立ては終了です。

車椅子本体のアームレストパイプに有る異型縦パイプ受け金具に挿入し、付属のエンドキャップを下端に嵌め、付属のポップリベットで固定します。

（写真では受け金具に挿入する前にエンドキャップが嵌っていますが、その状態では受け金具に挿入出来ません。）

## 2. 既存車椅子の異型縦パイプ（アームサポートの高さ調整パイプ）を使っての組立て方。

パイプの下端に付いているエンドキャップを固定しているポップリベットを取り、本体を金具から抜き取ります。

アームパッドを取り外します。

その状態では異型縦パイプの上部に丸パイプがT字型に溶接されています。

異型縦パイプの丸パイプ溶接側を切断しバリを取り、肘掛取付け用専用ナットが挿入出来るようにします。切断箇所は、丸パイプ溶接側の1番上の穴芯から11.5m/mです。切断された異型縦パイプの上端から11.5m/mの所に1番上のφ8穴の芯がある事を確認してください。



### 穴あけ治具

パイプ上端より11.5m/mの上側穴、26.5m/m下がった穴のケガキを行う治具です。



### 使用法

切断側の上面にT字型部を乗せミゾに嵌めます。

下側の穴位置をケガいて穴（φ6.2～6.5）を開けて下さい。裏表のバリを取って下さい。

既存の異型縦パイプはφ8の穴が20m/mピッチで開いています。アームサポートの高さ調整は適時に適応した穴で行って下さい。

2箇所の穴明けが終わりましたら、後の取付け方法は専用オプションパイプの場合と同様です。

以上が基本的に考えられる作業工程ですが、難しい時は考慮して作業して下さい。

[製造・販売・御質問先]

神奈川でく工房

担当：木下

〒216-0035 神奈川県川崎市宮前区馬絹1 6 3 0

TEL:044-865-5783 FAX:044-857-5387